

Käyttöohje – Peukalotuet


Valmistaja suosittelee, että tuen sovittaa ja muokkaa rekisteröity tai muutoin pätevä terveydenhuollon ammattihenkilö. Käyttäjien, joilla on diabetes, herkkä iho, kosketusallergioita, tuntopuutoksia tai huono verenkierto, tulee olla erityisen tarkkaavaisia tuen käytön aikana ja tarkkailla aiheutuuko tuen käytöstä puristusta, hankausta tai turvotusta. Tarkista aina tuen materiaalit alla olevista tiedoista. Ota yhteyttä tuen luovuttaneeseen tahoon tai jakelijaan, mikäli tuotteesta on kysyttävää.

Käyttötarkoitus

Peukalotuki tukee käyttäjän peukalon CMC1 ja MP-niveliä vamman tai leikkauksen jälkeen, kroonisen kivun, nivelrikon tai rasitusvammojen yhteydessä. Tukea voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevänä raskaiden tai toistuvien liikkeiden yhteydessä.

Pukeminen

1. Avaa tarranauhat, säädä peukalon nauha sopivalle kireydelle ja aseta peukalo tukeen kuten kuvassa.
2. Sulje tarranauhat siten, että tuki istuu käteen mukavasti.
3. Mikäli tuessa on tukilasta, se on tarvittaessa irrotettavissa ja säädettävissä vastaamaan käyttäjän käden asentoa ja tarpeita. Pujota tukilasta takaisin taskuunsa.

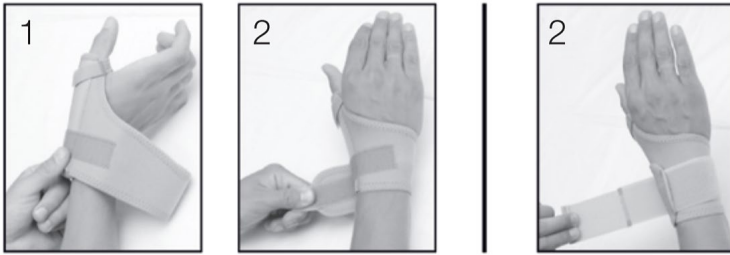

Leikkaa tarranauhat sopivan mittaisiksi. Säädä tarranauhojen kireyttä tarvittaessa. On tärkeää, että tuki istuu mukavasti ilman puristusta tai hankausta, eikä se haittaa normaalia verenkiertoa.

Materiaali

Stabil: puuvilla, polyesteri, elastaani.

Comfort: puuvilla, polyamidi, polyesteri, elastaani.

Neopreeni: synteettinen kumi, polyesteri, polyamidi.

Soft: polyesteri, viskoosi, elastaani, nailon.

Kaikki materiaalit ovat lateksittomia.

Pesuehje

Sulje tarranauhat ja poista tukiosat taskuistansa ennen pesua.

Noudata pesuehjeita. Käytä pesupussia. Kuivaus huoneenlämmössä.



Kokotaulukko

Koko	Ranteen ympärysmitta	Koko	Ranteen ympärysmitta	Koko	Ranteen ympärysmitta	Koko	Ranteen ympärysmitta
XXS	10 – 12 cm	S	14 – 16 cm	L	18 – 20 cm	XXL	22 – 24 cm
XS	12 – 14 cm	M	16 – 18 cm	XL	20 – 22 cm		

*Mittaa ranteen ympärysmitta. Kokotaulukko on suuntaa antava. Tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Mikäli tuki sisältää neopreenia, suositeltava käyttöaika yhtäjaksoisesti on maksimissaan 4 tuntia.

Kierrätys

Poista irrotettavissa olevat tukiosat ja lajittele paikallisten säädösten mukaisesti.

Laite täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvarliga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde

Ortosen stödjer och avlastar tummens CMC1- och MP-led efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Applicering

1. Öppna kardborrbanden och stäng tumgreppet motsvarande tummens omfång. Placera tummen i ortosen enligt bild 1.
2. Stäng samtliga kardborrband och justera så att ortosen sitter behagligt. Bild 2
3. Om ortosen har en skena kan denna vid behov tas ur skenfickan och anpassas efter brukarens hand. Placera sedan i skenfickan igen.



Klipp av överflödigt kardborrband för ett renare och snyggare utseende. Justera kardborrbanden vid behov. Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

Material

Stabil: bomull, polyester, elastan. **Comfort:** bomull, polyamid, polyester, elastan.

Neopren: syntetiskt gummi, polyester, polyamid. **Soft:** polyester, viskos, elastan, nylon. Samtliga material är latexfria.

Tvättråd

Slut kardborrbanden och ta ut ev. skena ur skenfickan. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



Måttabell

Strl	*Mått	Strl	*Mått	Strl	*Mått
XXS	10 - 12 cm	M	16 - 18 cm	XL	20 - 22 cm
XS	12 - 14 cm	L	18 - 20 cm	XXL	22 - 24 cm
S	14 - 16 cm				

*Mått tas runt handleden och ska ses som en vägledning. Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient. Om produkten innehåller neopren rekommenderas användning max 4 timmar åt gången.

Återvinning: Om produkten har en löstagbar skena, tag ur denna och sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.



Manufacturer Catell AB

Örnsköldsvik 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se