

Käyttöohje – Turvotuskäsineet

Valmistaja suosittelee, että tuotteen sovittaa ja muokkaa rekisteröity tai muutoin pätevätoimintaterveydenhuollon ammattihenkilö. Käyttäjien, joilla on diabetes, herkkä iho, kosketusallergioita, tuntopuutoksia tai huono verenkierto, tulee olla erityisen tarkkaavaisia tuen käytön aikana ja tarkkailla aiheutuuko tuen käytöstä puristusta, hankausta tai turvotusta. Kompressiokäsineiden käyttö voi olla kiellettyä joissain tapauksissa esim. akuutti infektio tai tulehdusreaktio, sydänvaivat, kasvaimet, munuais- ja maksasairaudet tai neuropatiat – epäselvissä tilanteissa konsultoi lääkärää.

Tarkista aina tuen materiaalit alla olevista tiedoista. Ota yhteyttä tuen luovuttaneeseen tahoon tai jakelijaan, mikäli tuotteesta on kysyttävää.

Malli	Paineluokka	Tuotenumero
Catell Turvotuskäsine kärjet auki	1-2 (15-25 mmHg)	5050
Catell Turvotuskäsine kärjet kiinni	1-2 (15-25 mmHg)	6050
Edema Light kärjet auki	1-2 (15-25 mmHg)	7050, 7051
Edema Light kärjet kiinni	1-2 (15-25 mmHg)	7150, 7151
Edema More kärjet auki	2 (23-32 mmHg)	8050, 8051
Edema More kärjet kiinni	2 (23-32 mmHg)	8150, 8151

Koko	Rystysten ympärys	Malli
XXS	13-15 cm	Edema Light ja Edema More
XS	15-18 cm	kaikki mallit
S	18-20 cm	kaikki mallit
M	20-22 cm	kaikki mallit
L	22-24 cm	kaikki mallit
XL	24-27 cm	Edema Light ja Edema More

Huomio – EDEMA-käsineet ovat bilateraalisia. Catell turvotuskäsineissä on oikea/vasen. Kokotaulukko on suuntaa antava.

Ominaisuudet

Ulkopuolelle asettuvat saumat vähentävät painetta herkissä kohdissa.

Käyttö

Turvotuksen vähentämiseen ammattihenkilön suosituksen mukaisesti. Saumat puetaan ulospäin.

Ota yhteyttä suosittelijaan, mikäli

- Turvotus lisääntyy
- Käsine aiheuttaa puutumista tai kipua

Materiaali

Nailon ja lycra. Lateksiton.

Pesuohe

Noudata pesuoheja. Käytä pesupussia. Tasokuivaus.



Tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Kierrätys

Lajittele paikallisten säädösten mukaisesti.

Laite täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

Bruksanvisning Ödemhandskar

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ökat ödem under användning. Behandling med kompression kan vara kontraindicerat vid vissa tillstånd t.ex. pågående infektion/ inflammation, hjärtproblematik, tumörsjukdom, njur- och leversjukdom och perifer neuropati- vid osäkerhet rådfråga läkare. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvariga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

MODELL	KOMPRESSIONSKLASS	ART.NR
Catell Ödemhandske ¾ Finger	1-2 (15-25 mmHg)	5050
Catell Ödemhandske Fullfinger	1-2 (15-25 mmHg)	6050
EDEMA Light ¾ Finger	1-2 (15-25 mmHg)	7050, 7051
EDEMA Light Fullfinger	1-2 (15-25 mmHg)	7150, 7151
EDEMA Light Long Fullfinger	1-2 (15-25 mmHg)	7160
EDEMA More ¾ Finger	2 (23-32 mmHg)	8050, 8051
EDEMA More Fullfinger	2 (23-32 mmHg)	8150, 8151

MODELL	STRL	* MÅTT
Endast EDEMA	XXS	13-15 cm
Catell Ödemhandske, EDEMA	XS	15-18 cm
Alla modeller	S	18-20 cm
Alla modeller	M	20-22 cm
Alla modeller	L	22-24 cm
Endast EDEMA	XL	24-27 cm

*Mått tas runt MCP-leder och ska ses som en vägledning.

Notera – EDEMA är bilateral. Catell Ödemhandske är tillgänglig i Vänster/Höger.

Egenskaper

- Sömmar på utsidan för att minimera tryck på känsliga punkter.

Använd handsken

- I svullnadsreducerande syfte, enligt ordination från förskrivare.
- Med sömmarna utåt.

Kontakta din förskrivare om

- Svullnaden ökar.
- Handsken orsakar känselbortfall/domningar.
- Handsken orsakar smärta.

Material

Nylon, lycra. Produkten är latexfri.

Tvätttråd

Följ tvätttråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt handsken plantorka.



Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se 230416:4