

Käyttöohje – Fingerlift-lisäosa

Valmistaja suosittelee, että tuen sovittaa ja muokkaa rekisteröity tai muutoin pätevätyntytterveydenhuollon ammattihenkilö. Käyttäjien, joilla on diabetes, herkkä iho, kosketusallergioita, tuntopuutoksia tai huono verenkierto, tulee olla erityisen tarkkaavaisia tuen käytön aikana ja tarkkailla aiheutuuko tuen käytöstä puristusta, hankausta tai turvotusta. Tarkista aina tuen materiaalit alla olevista tiedoista. Ota yhteyttä tuen luovuttaneeseen tahoon tai jakelijaan, mikäli tuotteesta on kysyttävää.

Käyttötarkoitus

Fingerlift-lisäosa tukee ja kohottaa käyttäjän II-V-sormia vamman tai leikkauksen jälkeen, kroonisen kivun, nivelrikon, hermopinteen tai rasitusvammojen yhteydessä. Lisäosaa käytetään yhdessä Lacy- tai Prisma-sarjojen rannetukien kanssa.

Pukeminen

1. Pue ensin rannetuki sen ohjeiden mukaisesti.
2. Pujota sormet II-V lisäosan lenkkien läpi, kukin omaan lenkkiinsä. Kuva 1.
3. Kiinnitä Fingerlift-lisäosan tarranauha rannetuen kämmenselän puoleiseen nukkapintaan.



Säädä tuen kireyttä tarvittaessa. On tärkeää, että tuki istuu mukavasti ilman puristusta tai hankausta, eikä se haittaa normaalia verenkiertoa.

Materiaali

Polyesteri, viskoosi, elastaani, nailon. Lateksiton.

Pesuohe

Sulje tarranauhat ja poista mahdolliset tukiosat rannetuesta ennen pesua. Noudata pesuohjeita. Käytä pesupussia. Kuivaus huoneenlämmössä.



Koko

Yksi koko. Tuki on bilateraallinen eli sitä voidaan käyttää sekä oikeassa, että vasemmassa kädessä.

Kierrätys

Poista irrotettavissa olevat tukiosat ja lajittele paikallisten säädösten mukaisesti.

Laite täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

Jakelija Villa Manus Oy, Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa, Suomi
Suomennos Catell AB:n luvalla 25.5.2021

201001:3

Bruksanvisning - Fingerlift

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvarliga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde

Ortosen stödjer och lyfter brukarens basfalanger dig II-V, samt dig I, i samband med nervinklämning, efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Produkten används i kombination med Lacy- eller Prismaortoser.

Applicering

1. Applicera handledsortosen enligt dess bruksanvisning.
2. Trä därefter in pekfinger till lillfinger i Fingerlifts hällor, ett finger i vardera hälla. Bild 1
3. Fäst Fingerlift på handledsortosens mjuka dorsala kardborre.



Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

Material

Soft: polyester, viskos, elastan, nylon. Produkten är latexfri.

Tvätttråd

Slut kardborrbanden och ta ut ev. skena ur skenfickan. Följ tvätttråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



Storlek

One size. Produkten är bilateral.

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

Återvinning

Om produkten har en löstagbar skena, tag ur denna och sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se