

Käyttöohje - Kämmensuojat

Valmistaja suosittelee, että tuotteen sovittaa ja muokkaa rekisteröity tai muutoin pätevätoimintaterveydenhuollon ammattihenkilö. Käyttäjien, joilla on diabetes, herkkä iho, kosketusallergioita, tuntopuutoksia tai huono verenkierto, tulee olla erityisen tarkkaavaisia tuen käytön aikana ja tarkkailla aiheutuuko tuen käytöstä puristusta, hankausta tai turvotusta. Tarkista aina tuen materiaalit alla olevista tiedoista. Ota yhteyttä tuen luovuttaneeseen tahoon tai maahantuojaan, mikäli tuotteesta on kysyttävää.

Käyttötarkoitus

Kämmensuoja tukee käyttäjän kättä ja sormia tapaturman, leikkauksen, kroonisen kivun, spastisiteetin ja /tai sairauden jälkeen. Tukea voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevään tarkoitukseen.

Pukeminen

1. Jos tuessa on kiinteä kiinnitysnauha, venytä nauha kädenselän puolelle ja aseta käsi tuen ympärille
2. Jos tuessa on tarranauhat, avaa nauhat ja aseta tuki kuvan mukaisesti kämmenpuolelle
3. Sulje tarranauha huolellisesti niin että tuki tuntuu miellyttävältä
4. Mikäli käytät kartio- muotoilua kämmensuojaa, voidaan muotoa käyttää avuksi peukalon tarttumisosotteeseen



Leikkaa tarranauhat sopivan mittaisiksi. Säädä tarranauhojen kireyttä tarvittaessa. On tärkeää, että tuki istuu mukavasti ilman puristusta tai hankausta, eikä se haittaa normaalia verenkiertoa.

Materiaali

Palm Grip/Finger Contracture: frotee, puuvilla **Palm Cone:** frotee, muovi kartio. Lateksiton.

Pesuohe

Sulje tarranauhat ja poista tukiosat taskuista ennen pesua. Noudata pesuohteita. Käytä pesupussia. Kuivaus huoneenlämmössä.



Kokotaulukko

Malli	Tuotenumero	Koko	Tyynyn/Kartion mitat
Palm Grip	6507	S	11 x 6 cm
Palm Grip	6508	L	13 x 7 cm
Palm Cone	5608	Yksi koko	13 cm
Finger Contracture	6560	Yksi koko	15 x 9 cm

Tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Kierrätys

Poista irrotettavissa olevat tukiosat ja lajittele paikallisten säädösten mukaisesti.

Laite täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

Jakelija Villa Manus Oy, Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa, Suomi

201001:3

Suomennot Catell AB:n luvalla 03.05.2023

Bruksanvisning – Handbaserade ortoser

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvariga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde

Ortosen stödjer och avlastar brukarens hand och fingrar efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, spasticitet och/eller sjukdom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte.

Applicering

1. Om ortosen har ett stängt band, trä bandet över handryggen och slut handen kring ortosen enligt bild 1.
2. Om produkten har kardborreband öppna dessa och placera handen i ortosen enligt bild 2.
3. Stäng samtliga kardborreband så att dess hårda och mjuka del täcker varandra och ortosen sitter behagligt bild 3.
4. Vid användning av en konformad ortos kan konformen användas i syfte att reglera öppningsgreppet i tummen, beroende på vilken ände av konen som placeras tumgreppet, bild 4.



Klipp av eventuellt överflödigt kardborreband för ett renare och snyggare utseende. Justera kardborrebanden vid behov. Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

Material

Palm Grip/Finger Contracture: frotté, bomull. **Palm Cone:** frotté, plastkon. Samtliga material är latexfria.

Tvättråd

Slut kardborrebanden och ta ur eventuell kon. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse.



Måttabell

Modell	Art#	Storlek	Mått för kudde/kon
Palm Grip	6507	Small	11 x 6 cm
Palm Grip	6508	Large	13 x 7 cm
Palm Cone	5608	One size	13 cm
Finger Contracture	6560	One size	15 x 9 cm

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.