

KÄYTTÖOHJEET

A. Tuotetiedot

Plastazote® on lämpömuokattava polyeteenivaakto ortoosien valmistukseen. Sopii ortooseihin, joissa käyttömukavuus on tärkeää. Plastazotesta® voidaan valmistaa pohjallisia, kaularangantukia, reumaatikkojen ja diabetespotilaiden ortooseja ja sitä voidaan käyttää myös ortoosien pehmusteena.

Ei sovellu sisäiseen käyttöön. Tuotetta ei saa käyttää avoimiin haavoihin tai laittaa suuhun.

B. Tuotevalikoima

Tuotenumero	Tuote	Paksuus	Väri
617S8=6	Plastazote 100 x 100 cm	6 mm	beige
617S8=12	Plastazote 100 x 100 cm	12 mm	beige
617S8=18	Plastazote 100 x 100 cm	18 mm	beige
617S17=6	Plastazote 100 x 100 cm	6 mm	sininen
617S17=12	Plastazote 100 x 100 cm	12 mm	sininen
617S18=6	Plastazote 100 x 100 cm	6 mm	punainen
617S18=12	Plastazote 100 x 100 cm	12 mm	punainen

C. Turvatoimenpiteet ennen käyttöä

1. Tarvittavat työvälineet eivät saa asettaa potilasta vaaraan.
2. Varmista, että potilaalla on hyvä ja miellyttävä asento sekä varmista, että pääset esteettömästi työskentelemään.
3. Varmista, ettei materiaali polta potilaan ihoa. Tarvittaessa suojaa iho.

D. Käyttö

Aktivoi Plastazote-materiaali uunissa 140 °C. Materiaali on valmis, kun pinta muuttuu hieman kiiltäväksi ja materiaali pehmeäksi. Plastazote jäähtyy nopeasti, joten työskentele ripeästi. Muotoile lämmin Plastazote haluttuun muotoon ja pidä paikoillaan, kunnes materiaali on täysin jäähtynyt. Pieniä muutoksia voidaan tehdä lämmittämällä uudestaan kuumailmapuhaltimella.

E. Potilaan ohjeistaminen

Ohjeista potilasta ortoosin/apuvälineen oikeasta pukemistavasta ja käytöstä. Liian tiukalle kiinnitetyt nauhat voivat haitata verenkiertoa ja johtaa kudosten kuolioon.

F. Huolto ja tuotteen hävitys

Plastazote-materiaalista valmistetut ortoosit voidaan pestä käsin miedolla pesuaineella. Huuhtelee hyvin ja kuivaa perusteellisesti.

Älä koskaan käytä liuottimia. Vältä happamia pesuaineita. Desinfiointi on mahdollista alkoholilla tai erilaisilla desinfiointisaippuilla. Käytön jälkeen voidaan hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

G. Varastointi

Varastointi tulee tehdä pimeässä, viileässä ja kuivassa tilassa, jonka lämpötila on alle 25 °C astetta. Säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan pölyltä suojassa.

H. Yleiset turvallisuusohjeet

- Ei sovellu sisäiseen käyttöön. Tätä tuotetta ei saa käyttää avoimiin haavoihin tai laittaa suuhun.
- Anna potilaalle riittävästi tietoa ortoosin/apuvälineen käytöstä, käyttöaikatauluista ja huollosta.

I. Lisäinformaatio

Valmistaja Ottobock. Jälleenmyynti Suomessa: Villa Manus Oy



BRUKSANVISNING

A. Produktinformation

Plastazote® är ett polyetenskum som aktiveras vid uppvärmning för tillverkning av ortoser. Materialet lämpar sig för ortoser där komfort är viktigt. Plastazote® kan användas för att tillverka sulor, nackstöd, ortoser för reumatiker och diabetiker samt kan även användas som polster i ortoser.

Ej lämpligt för internt bruk. Produkten får inte användas på öppna sår eller i munnen.

B. Produktsortiment

Tuotenumero	Tuote	Paksuus	Väri
617S8=6	Plastazote 100 x 100 cm	6 mm	beige
617S8=12	Plastazote 100 x 100 cm	12 mm	beige
617S8=18	Plastazote 100 x 100 cm	18 mm	beige
617S17=6	Plastazote 100 x 100 cm	6 mm	blå
617S17=12	Plastazote 100 x 100 cm	12 mm	blå
617S18=6	Plastazote 100 x 100 cm	6 mm	röd
617S18=12	Plastazote 100 x 100 cm	12 mm	röd

C. Försiktighetsåtgärder före användning

1. Användning av nödvändiga verktyg får inte äventyra patientsäkerheten.
2. Se till att patienten är i en bra och bekväm position och se till att du kan arbeta obehindrat.
3. Se till att materialet inte bränner patientens hud. Vid behov, skydda huden.

D. Användning

Aktivera Plastazote-materialet i ugnen vid 140 °C. Materialet är klart när ytan blir något blank och materialet mjukt. Plastazote svalnar snabbt, så arbeta snabbt. Forma den varma Plastazote i önskad form och håll den på plats tills materialet har svalnat helt. Mindre förändringar kan göras genom att värma upp igen med en varmluftsfläkt.

E. Patientinstruktion

Instruera patienten rätt om ortosens/hjälpmedlets fastsättningsbands korrekta påklädning, spänning och riktning. Band som fäst för hårt kan hindra blodcirkulationen och leda till vävnadsnekros.

F. Underhåll och avfallshantering

Ortoser av Plastazote kan tvättas för hand med ett mildt rengöringsmedel. Skölj väl och torka noggrant.

Använd aldrig lösningsmedel. Undvik sura rengöringsmedel. Desinfektion är möjlig med alkohol eller olika desinfektionsmedel. Efter användning kan den kasseras med vanligt hushållsavfall.

G. Förvaring

Förvaring ska ske på en mörk, sval och torr plats vid en temperatur under 25 °C. Förvara produkten i originalförpackningen för att skydda mot damm.

H. Allmänna säkerhetsanvisningar

- **Inte lämpligt för invärtes bruk. Denna produkt ska inte användas på öppna sår eller i munnen.**
- **Förse patienten med adekvat information om användning, scheman och underhåll av ortosen /hjälpmedlet.**

I. Ytterligare information

Tillverkad av Ottobock. Återförsäljning i Finland: Villa Manus Oy

