

KÄYTTÖOHJEET

A. Tuotetiedot

Polycushion on itsekiinnittyvä joustava vaahtomuovipehmuste ortoosien, tukien sekä apuvälineiden pehmustamiseen ja käyttömukavuuden lisäämiseen.

HUOM! Ei sovellu sisäiseen käyttöön, suuhun tai avoimille haavoille.

B. Tuotevalikoima

Tuotenro	Koko	Paksuus	Kiinnittyvyys	Väri
192913	45 x 61cm	3,2 mm	Matala	beige
192041	45 x 61cm	3,2 mm	Korkea	beige
192852	45 x 61 cm	3,2 mm	Korkea	musta

C. Turvatoimenpiteet ennen käyttöä

1. Tarvittavat työvälineet eivät saa asettaa potilasta vaaraan.
2. Varmista, että potilaalla on hyvä ja miellyttävä asento sekä varmista, että pääset esteettömästi työskentelemään.

D. Käyttö

1. Leikkaa Polycushion-levystä tarvittava pala saksilla ennen kuin poistat suojapaperin liimapinnan päältä.
2. Polycushion -pehmuste kiinnitetään matalalämpömuoviin joko ennen muovin aktivoimista tai ortoosin muotoilun jälkeen. Huomioi pehmusteen viemä tila ortoosin muotoilussa.
3. Irrota taustapuolen suojapaperia vähitellen ja paina Polycushion-pehmuste ortoosin pinnalle. Varo, ettei pehmusteen liimapinnat tartu toisiinsa, niitä ei saa enää irti.
4. Polycushion-pehmuste on irrotettavissa ortoosista heti kiinnittämisen jälkeen.

E. Huolto ja tuotteen hävitys

Polycushion -pehmusteella huoliteltu ortoosi suositellaan puhdistettavan päivittäin. Käytä puhdistamiseen haalean lämmintä vettä ja nestemäistä saippuaa, astianpesuainetta, hammastahnaa tai kosteuspyyhkeitä. Huuhtelee hyvin ja kuivaa perusteellisesti.

Älä koskaan käytä puhdistamiseen liuottimia. Vältä happamia pesuaineita.

Tuotetta ei voi steriloida. Desinfiointi on mahdollista alkoholilla tai erilaisilla desinfiointisaippuilla.

HUOM! Älä altista matalalämpömuovista valmistettua ortoosia yli 65 asteen lämpötilalle (esimerkiksi auton kojelaudalla, saunassa, lämpöpatterin tai tulisijan läheisyydessä).

Käytön jälkeen Polycushion-pehmuste voidaan hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

F. Varastointi

Varastointi tulee tehdä pimeässä, viileässä ja kuivassa tilassa, jonka lämpötila on 10 °C – 30 °C. Säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessa.

G. Yleiset turvallisuusohjeet

- Ei sovellu sisäiseen käyttöön. Tätä tuotetta ei saa käyttää avoimiin haavoihin tai laittaa suuhun.

H. Lisäinformaatio

Valmistaja Catell Ab. Maahantuonti ja jälleenmyynti Suomessa Villa Manus Oy.



BRUKSANVISNING**A. Produktinformation**

Polycushion är en självhäftande elastiskt skumpolstring för att polstra ortoser, stöd och hjälpmedel samt öka komforten.

NOTERA! Ej lämplig för invärtes bruk, mun eller öppna sår.

B. Produktsortiment

Produktnr	Mått	Tjocklek	Vidhäftning	Färg
192913	45 x 61cm	3,2 mm	Låg	beige
192041	45 x 61cm	3,2 mm	Hög	beige
192852	45 x 61 cm	3,2 mm	Hög	svart

C. Försiktighetsåtgärder före användning

1. Användning av nödvändiga verktyg får inte äventyra patientsäkerheten.
2. Se till att patienten är i en bra och bekväm position och se till att du kan arbeta obehindrat.

D. Användning

1. Klipp ut den önskade POLYCUSHION-delen med en sax innan du tar bort skyddspapperet från den självhäftande ytan.
2. POLYCUSHION -delen fästs på lågtemperaturplasten antingen innan plasten aktiveras eller efter att ortosen har formats. Observera utrymmet som dynan tar när du formare ortosen.
3. Ta bort skyddspapperet gradvis och tryck POLYCUSHION -polstringen på ortosen. Var försiktig så att polstringens självhäftande ytor inte klibbar ihop, de kan inte längre tas isär.
4. POLYCUSHION-polstring kan avlägsnas från ortosen omedelbart efter fastsättning.

E. Underhåll och avfallshantering

Det rekommenderas att rengöra ortosen med POLYCUSHION -polstringen dagligen. Använd ljummet vatten och flytande tvål, diskmedel, tandkräm eller fuktig trasa för rengöring. Skölj väl och torka noggrant.

Använd aldrig lösningsmedel för rengöring. Undvik sura rengöringsmedel. Produkten kan inte steriliseras. Desinfektion är möjlig med alkohol eller desinfektionsmedel.

OBSERVERA! Utsätt inte plastortoser för temperaturer över 65 grader (till exempel i en het bil, bastu, nära ett värmeelement eller öppen eld).

Efter användning kan LUXOFOAM-polstring kasseras som normalt hushållsavfall.

F. Förvaring

Förvara på en mörk, sval och torr plats vid en temperatur mellan 10 °C - 30 °C och förvara produkten i originalförpackningen.

G. Allmänna säkerhetsanvisningar

- Inte lämpligt för invärtes bruk. Denna produkt ska inte användas på öppna sår eller i munnen.

H. Ytterligare information

Tillverkad av Catell Ab. Import och återförsäljning i Finland Villa Manus Oy.

