

KÄYTTÖOHJEET

A. Tuotetiedot

ProWrap by FabriFoam on materiaali, josta voi valmistaa pehmeitä ortooseja, ortoosinauhoja, stabiloivia sidoksia ja kompressiositeitä. ProWrap on hieman elastinen, venyy yhteen suuntaan. Vaihtoehtoinen materiaali neopreenille. Materiaali on hengittävää, iholle miellyttävää ja se poistaa kosteutta iholta. Kevyen materiaalin toinen puoli on luistamatonta, hyvin ihoa vasten pysyvää vaahtomaista materiaalia ja toinen puoli kangasta (nailon ja lycra), jota vasten koukkutarranauha kiinnittyy helposti. Ei sisällä lateksia.

Ei sovellu sisäiseen käyttöön. Tuotetta ei saa käyttää avoimiin haavoihin tai laittaa suuhun.

B. Tuotevalikoima

Tuotenumero	Koko	Pakkauskoko
20102	5 cm x 9,1 m	2 kpl/ pkt
20054	10 cm x 4,55 m	1 kpl/ pkt
20056	10 cm x 4,55 m	1 kpl/ pkt

C. Turvatoimenpiteet ennen käyttöä

1. Tarvittavat työvälineet eivät saa asettaa potilasta vaaraan.
2. Varmista, että potilaalla on hyvä ja miellyttävä asento sekä varmista, että pääset esteettömästi työskentelemään.

D. Käyttö

ProWrap-materiaalia voidaan käyttää sidoksina tai nauhoina erilaisissa ortooseissa. Siitä voi myös valmistaa pehmeitä ortooseja ompelemalla. Materiaalia voidaan leikata haluttuun pituuteen ja muotoon sekä pituus, että leveyssuunnassa ilman, että materiaali purkaantuu. Nukkapintaan tarttuu erityisen hyvin kiinni matalaprofiiliset koukkutarranauhat.

E. Potilaan ohjeistaminen

Ohjeista potilasta ortoosin/apuvälineen nauhojen oikeasta pukemistavasta, -suunnasta ja -kireydestä. Liian tiukalle kiinnitetyt nauhat voivat haitata verenkiertoa ja johtaa kudosten kuoliin.

F. Huolto ja tuotteen hävitys

Irtonaiset nauhat voidaan pestä käsin tai pesukoneessa pesupussissa miedolla pesuaineella. Ortoosissa/apuvälineessä kiinteästi kiinni olevat tarranauhat voidaan puhdistaa ortoosin/apuvälineen huolto-ohjeiden mukaisesti. Käytä tällöin puhdistamiseen haalean lämmintä vettä ja nestemäistä saippuaa, astianpesuainetta tai kosteuspyyhkeitä. Huuhtelee hyvin ja kuivaa perusteellisesti.

Älä koskaan käytä liuottimia. Vältä happamia pesuaineita. Desinfiointi on mahdollista alkoholilla tai erilaisilla desinfiointisaippuoilla. Käytön jälkeen voidaan hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana aiheuttamatta haittaa ympäristölle.

G. Varastointi

Varastointi tulee tehdä pimeässä, viileässä ja kuivassa tilassa, jonka lämpötila on alle 25°C astetta. Säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan pölyltä suojassa.

H. Yleiset turvallisuusohjeet

- Ei sovellu sisäiseen käyttöön. Tätä tuotetta ei saa käyttää avoimiin haavoihin tai laittaa suuhun.
- Anna potilaalle riittävästi tietoa ortoosin/apuvälineen käytöstä, käyttöaikatauluista ja huollosta.

I. Lisäinformaatio:

Valmistaja FabriFoam. Maahantuonti ja jälleenmyynti Suomessa: Villa Manus Oy



BRUKSANVISNING**A. Produktinformation**

ProWrap av FabriFoam är ett material som kan användas för att göra mjuka ortoser, ortosband, stabiliserande bandage och kompressionsbandage. ProWrap är lätt elastisk, sträcker sig i en riktning. Ett alternativt material till neopren. Materialet andas, är hudvänligt och är fukttransparent. Materialets ena sida är glid fri och väl vidhäftande skumliknande material och den andra sidan är tyg (nylon och lycra) mot vilket kardborrbandet fästs lätt. Produkten innehåller inte latex.

Ej lämpligt för invärtes bruk. Produkten ska inte användas på öppna sår eller i munnen.

B. Produktsortiment

Artikelnummer	Mått	Enhet
20102	5 cm x 9,1 m	2 kpl/ pkt
20054	10 cm x 4,55 m	1 kpl/ pkt
20056	10 cm x 4,55 m	1 kpl/ pkt

C. Försiktighetsåtgärder före användning

1. Användning av nödvändiga verktyg får inte äventyra patientsäkerheten.
2. Se till att patienten är i en bra och bekväm position och se till att du kan arbeta obehindrat.

D. Användning

ProWrap-material kan användas som bandage eller fastsättningsband på olika ortoser. Materialet kan även användas för att tillverka mjuka ortoser genom att sy. Materialet kan klippas till i önskad längd och form både på längden och bredden utan att materialet rispas. Hårt lågprofils kardborrsband fäster bra på mjuka tyg ytan.

E. Patientinstruktion

Instruera patienten rätt om ortosens/hjälpmedlets fastsättningsbands korrekta påklädning, spänning och riktning. Band som fäst för hårt kan hindra blodcirkulationen och leda till vävnadsnekros.

F. Underhåll och avfallshantering

Lösa band kan tvättas för hand eller i tvättmaskin i en tvättpåse med ett mildt rengöringsmedel. Kardborreband som är fästa vid ortosen / hjälpmedlet kan rengöras enligt instruktionerna för ortos/underhåll. Vid manuell rengöring använd ljummet vatten och flytande tvål, diskmedel eller fuktiga trasor för rengöring. Skölj väl och torka noggrant.

Använd aldrig lösningsmedel. Undvik sura rengöringsmedel. Desinfektion är möjlig med alkohol eller olika desinfektionsmedel. Efter användning kan produkten kasseras med normalt hushållsavfall utan att skada miljön.

G. Förvaring

Förvaring ska ske på en mörk, sval och torr plats vid en temperatur under 25 °C. Förvara produkten i originalförpackningen för att skydda mot damm.

H. Allmänna säkerhetsanvisningar

- **Inte lämpligt för invärtes bruk. Denna produkt ska inte användas på öppna sår eller i munnen.**
- **Ge patienten adekvat information om användning, användningstider samt underhåll av ortosen/hjälpmedlet.**

I. Ytterligare information

Tillverkad av FabriFoam. Import och återförsäljning i Finland: Villa Manus Oy

