



Käyttöohje – Sormisukat

Valmistaja suosittelee, että tuotteen sovittaa ja muokkaa rekisteröity tai muutoin pätevä terveydenhuollon ammattihenkilö. Käyttäjien, joilla on diabetes, herkkä iho, kosketusallergioita, tuntopuutoksia tai huono verenkierto, tulee olla erityisen tarkkaavaisia tuen käytön aikana ja tarkkailla aiheutuuko tuen käytöstä puristusta, hankausta tai turvotusta.

Tarkista aina tuen materiaalit alla olevista tiedoista. Ota yhteyttä tuen luovuttaneeseen tahoon tai jakelijaan, mikäli tuotteesta on kysyttävää.

Malli	Paineluokka	Tuotenumero
Finger Light	1-2 (15-25 mmHg)	7250
Finger More	2 (23-32 mmHg)	8250

Koko	dist. ympärysmitta	prox. ympärysmitta
XS	30 mm	50 mm
S	40 mm	60 mm
M	50 mm	70 mm
L	60 mm	80 mm
XL	70 mm	90 mm

Kokotaulukko on suuntaa antava. Pituus 10 cm (sukka on lyhennettävissä leikkaamalla haluttuun pituuteen).

Ominaisuudet

Ulkopuolelle asettuvat saumat vähentävät painetta herkissä kohdissa.

Käyttö

Turvotuksen vähentämiseen ammattihenkilön suosituksen mukaisesti. Saumat puetaan ulospäin.

Ota yhteyttä suosittelijaan, mikäli

- Turvotus lisääntyy
- Sormisukka aiheuttaa puutumista tai kipua

Materiaali

Nailon ja lycra. Lateksiton.

Pesuohje

Noudata pesuohjeita. Käytä pesupussia. Tasokuivaus.



Tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Kierrätys

Lajittele paikallisten säädösten mukaisesti.

Laite täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

Bruksanvisning Fingerstrumpa

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvarliga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

MODELL	KOMPRESSIONSKLASS	ART.NR
Finger Light	1-2 (15-25mmHg)	7250, 7251
Finger More	2 (23-32mmHg)	8250, 8251

STRL	*CIRKULÄRT MÅTT DISTALT	*CIRKULÄRT MÅTT PROXIMALT
XS	30 mm	50 mm
S	40 mm	60 mm
M	50 mm	70 mm
L	60 mm	80 mm
XL	70 mm	90 mm

*Mått ska ses som en vägledning.

Strumpans längd: 10 cm

Egenskaper

- Sömmar på utsidan för att minimera tryck på känsliga punkter.

Använd fingerstrumpan

- I svullnadsreducerande syfte, enligt ordination från förskrivare.
- Med sömmarna utåt.

Kontakta din förskrivare om

- Svullnaden ökar.
- Strumpan orsakar känselbortfall/domningar.
- Strumpan orsakar smärta.

Material

Nylon, lycra. Produkten är latexfri.

Tvättråd

Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt strumpan plantorka.



Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.