



Käyttöohje – Sormisukat

Valmistaja suosittelee, että tuotteen sovittaa ja muokkaa rekisteröity tai muutoin pätevätyntä terveydenhuollon ammattihenkilö. Käyttäjien, joilla on diabetes, herkkä iho, kosketusallergioita, tuntopuutoksia tai huono verenkierto, tulee olla erityisen tarkkaavaisia tuen käytön aikana ja tarkkailla aiheutuuko tuen käytöstä puristusta, hankausta tai turvotusta.

Tarkista aina tuen materiaalit alla olevista tiedoista. Ota yhteyttä tuen luovuttaneeseen tahoon tai jakelijaan, mikäli tuotteesta on kysyttävää.

Malli	Paineluokka	Tuotenumero
Finger Light	1-2 (15-25 mmHg)	7250
Finger More	2 (23-32 mmHg)	8250

Koko	dist. ympärysmitta	prox. ympärysmitta
XS	30 mm	50 mm
S	40 mm	60 mm
M	50 mm	70 mm
L	60 mm	80 mm
XL	70 mm	90 mm

Kokotaulukko on suuntaa antava. Pituus 10 cm (sukka on lyhennettävissä leikkaamalla haluttuun pituuteen).

Ominaisuudet

Ulkopuolelle asettuvat saumat vähentävät painetta herkissä kohdissa.

Käyttö

Turvotuksen vähentämiseen ammattihenkilön suosituksen mukaisesti. Saumat puetaan ulospäin.

Ota yhteyttä suosittelijaan, mikäli

- Turvotus lisääntyy
- Sormisukka aiheuttaa puutumista tai kipua

Materiaali

Nailon ja lycra. Lateksiton.

Pesuohe

Noudata pesuoheita. Käytä pesupussia. Tasokuivaus.



Tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Kierrätys

Lajittele paikallisten säädösten mukaisesti.

Laite täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se