

KÄYTTÖOHJEET
A. Tuotetiedot

Fleecepehmuste ortoosien ja apuvälineiden pehmustamiseen. Materiaalina puuvillafleece. Kangas ja liimapinta joustavat molempiin suuntiin, mikä helpottaa pehmusteen kiinnittämistä erilaisiin muotoihin.

Ei sovellu sisäiseen käyttöön. Tuotetta ei saa käyttää avoimiin haavoihin tai laittaa suuhun.

B. Tuotevalikoima

Tuotenumero	Tuote	Pakkaus
10268	Pinkki 20 x 30 cm	9 levyä
10253	Viininpunainen 20 x 30 cm	9 levyä
10265	Turkoosi 20 x 30 cm	9 levyä
10151	Kitti 20 x 30 cm	9 levyä
10152	Musta 20 x 30 cm	9 levyä
10264	Keltainen 20 x 30 cm	9 levyä
10263	Beige 20 x 30 cm	9 levyä
10163	Ohut puuvillafleece värisekoitus 20 x 30 cm	9 levyä
10152E	Musta 45 x 30 cm	4 levyä
10158E	Beige 45 x 30 cm	4 levyä


C. Turvatoimenpiteet ennen käyttöä

1. Tarvittavat työvälineet eivät saa asettaa potilasta vaaraan.
2. Varmista, että potilaalla on hyvä ja miellyttävä asento sekä varmista, että pääset esteettömästi työskentelemään.

D. Käyttö

Fleecepehmustetta voidaan käyttää pehmusteena erilaisissa ortooseissa ja apuvälineissä. Materiaalia voidaan leikata haluttuun pituuteen ja muotoon sekä pituus, että leveysuunnassa ilman, että materiaali purkaantuu. Joustavuus mahdollistaa kiinnittämisen sileästi erilaisiin muotoihin.

E. Huolto ja tuotteen hävitys

Fleecepehmusteella päällystetyt ortoosit/apuvälineet voidaan puhdistaa ortoosin/apuvälineen huolto-ohjeiden mukaisesti. Matalalämpömuovista valmistettujen ortoosien kohdalla käytä puhdistamiseen haalean lämmintä vettä ja nestemäistä saippuaa, astianpesuainetta tai kosteuspyyhkeitä. Huuhtelee hyvin ja kuivaa perusteellisesti.

Älä koskaan käytä liuottimia. Vältä happamia pesuaineita. Desinfiointi on mahdollista alkoholilla tai erilaisilla desinfiointisaippuoilla. Käytön jälkeen voidaan hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

F. Varastointi

Varastointi tulee tehdä pimeässä, viileässä ja kuivassa tilassa, jonka lämpötila on alle 25°C astetta. Säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan pölyltä suojassa.

G. Yleiset turvallisuusohjeet

- Ei sovellu sisäiseen käyttöön. Tätä tuotetta ei saa käyttää avoimiin haavoihin tai laittaa suuhun.
- Anna potilaalle riittävästi tietoa ortoosin/apuvälineen käytöstä, käyttöaikatauluista ja huollosta.

Laite täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset
Valmistaja: Villa Manus Oy, Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa



BRUKSANVISNING

A. Produktinformation

Använd Fleecepolstring för polstring av ortoser och hjälpmedel. Tillverkad av bomull. Tyget och den självhäftande ytan är flexibelt både på längden och bredden, vilket gör det lättare att fästa polstringen i olika former.

Ej lämpligt för invärtes bruk. Produkten ska inte användas på öppna sår eller i munnen.

B. Produktsortiment

Produktnummer	Typ	Förpackning
10268	Pink 20 x 30 cm	9 ark
10253	Vinröd 20 x 30 cm	9 ark
10265	Turkos 20 x 30 cm	9 ark
10151	Kitt 20 x 30 cm	9 ark
10152	Svart 20 x 30 cm	9 ark
10264	Gul 20 x 30 cm	9 ark
10263	Beige 20 x 30 cm	9 ark
10163	Tunn bomullsfleece, flerfärgat 20 x 30 cm	9 ark
10152E	Svart 45 x 30 cm	4 ark
10158E	Beige 45 x 30 cm	4 ark



C. Försiktighetsåtgärder före användning

1. Användning av nödvändiga verktyg får inte äventyra patientsäkerheten.
2. Se till att patienten är i en bra och bekväm position och se till att du kan arbeta obehindrat.

D. Användning

Fleece-polstret kan användas som polster i olika ortoser och hjälpmedel. Materialet kan klippas till i önskad längd och form både på längden och bredden utan att materialet rispas. Flexibilitet möjliggör smidig fastsättning på en mängd olika former.

E. Underhåll och avfallshantering

Fleece polstrade ortoser/hjälpmedel kan rengöras enligt instruktionerna för ortos/ hjälpmedel underhåll.

För lågtemperaturplast ortoser, använd ljummet varmt vatten och flytande tvål, diskmedel eller fuktig trasa för rengöring. Skölj väl och torka noggrant.

Använd aldrig lösningsmedel. Undvik sura rengöringsmedel. Desinfektion är möjlig med alkohol eller olika desinfektionsmedel. Efter användning kan den kasseras med vanligt hushållsavfall.

F. Förvaring

Förvaring ska ske på en mörk, sval och torr plats vid en temperatur under 25 ° C. Förvara produkten i originalförpackningen för att skydda mot damm.

G. Allmänna säkerhetsanvisningar

- **Inte lämpligt för invärtes bruk. Denna produkt ska inte användas på öppna sår eller i munnen.**
- **Ge patienten adekvat information om användning, användningstider samt underhåll av ortosen/ hjälpmedlet.**

Tillverkas av: Villa Manus Oy, Bäckhagsbrinken 4, 01600 Vanda.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen 2017:745, klass 1 produkter.

