

## Käyttöohje – Active Shoulder -olkatuki



Valmistaja suosittelee, että olkatuen sovittaa ja muokkaa rekisteröity tai muutoin pätevätyntä terveydenhuollon ammattihenkilö. Ota yhteyttä tuen luovuttaneeseen tahoon tai jakelijaan, mikäli tuotteesta on kysyttävää.

### Käyttötarkoitus

Olkatuki tukee käyttäjän yläraajaa ja olkapäätä vamman tai leikkauksen jälkeen.

### Pukeminen

1. Avaa tarranauhat ja pujota käsi tuen läpi. Vedä tuki ylös olkapäälle kuten kuvassa.
2. Kiinnitä ja säädä etuosan nauha sopivan pituiseksi muovisen soljen kautta. Pehmuste asettuu kainalon alle.
3. Sulje olkavarren tarranauhat sopivalle kireydelle.
4. Olkapään asentoa voidaan tarvittaessa säätää olkapään etu- ja takapuolilla olevilla nauhoilla haluttuun asentoon.

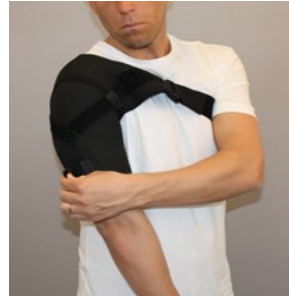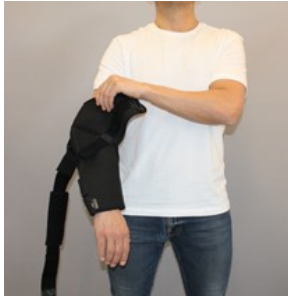

Säädä tarranauhojen kireyttä tarvittaessa. On tärkeää, että tuki istuu mukavasti ilman puristusta tai hankausta, eikä se häiritse normaalia verenkiertoa.

### Materiaali

Polyesteri, polyamidi, elastaani. Lateksiton.

### Pesuohe

Sulje tarranauhat ennen pesua. Noudata pesuohteja. Käytä pesupussia. Kuivaus huoneenlämmössä.



### Kokotaulukko

| Koko | Olkavarren ympärysmitta | Koko | Olkavarren ympärysmitta | Koko | Olkavarren ympärysmitta |
|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|
| XS   | 25 - 27 cm              | M    | 29 - 32 cm              | XL   | 35 - 38 cm              |
| S    | 27 - 29 cm              | L    | 32 - 35 cm              |      |                         |

\*Mittaa olkavarren ympärysmitta. Kokotaulukko on suuntaa antava. Tuki on bilateraalinen, voidaan pukea sekä oikeaan että vasempaan yläraajaan.

Tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

### Kierrätys

Erottele muovi- ja tekstiiliosat ja kierrätä paikallisten säädösten mukaisesti.

Laite täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

# Bruksanvisning – Catell Active Shoulder

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvariga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

## Användningsområde

Ortosen stödjer och avlastar brukarens arm och skuldra efter skada eller operation.

## Applicering

1. Öppna armdelens och bröstbandets kardborrband. Trä sedan armen genom ortosen, applicera på axeln. Bild 1
2. Fäst och justera bröstbandet genom att trä det genom plastöglan på framsidan. Bild 2
3. Justera armdelens kardborrstängning. Bild 3
4. Säkerställ att samtliga kardborrband är ordentligt stängda.



Ortosen kan behöva justeras med jämna mellanrum beroende på vilka situationer den används i. Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

## Material

Polyester, polyamid, elastan. Produkten är latexfri.

## Tvättråd

Slut kardborrbanden. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



## Måttabell

| Strl | *Mått      | Strl | *Mått      | Strl | *Mått      |
|------|------------|------|------------|------|------------|
| XS   | 25 - 27 cm | M    | 29 - 32 cm | XL   | 35 - 38 cm |
| S    | 27 - 29 cm | L    | 32 - 35 cm |      |            |

\*Mått tas runt överarmen och ska ses som en vägledning.

Produkten är bilateral.

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

## Återvinning

Separera plast och textil. Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

240411:5