

Käyttöohje – Thumblift-lisäosa

Valmistaja suosittelee, että tuen sovittaa ja muokkaa rekisteröity tai muutoin pätevätyntytterveydenhuollon ammattihenkilö. Käyttäjien, joilla on diabetes, herkkä iho, kosketusallergioita, tuntopuutoksia tai huono verenkierto, tulee olla erityisen tarkkaavaisia tuen käytön aikana ja tarkkailla aiheutuuko tuen käytöstä puristusta, hankausta tai turvotusta. Tarkista aina tuen materiaalit alla olevista tiedoista. Ota yhteyttä tuen luovuttaneeseen tahoon tai jakelijaan, mikäli tuotteesta on kysyttävää.

Käyttötarkoitus

Thumblift-lisäosa tukee ja kohottaa käyttäjän peukaloa vamman tai leikkauksen jälkeen, kroonisen kivun, nivelrikon, hermopinteen tai rasitusvammojen yhteydessä. Lisäosaa käytetään yhdessä Lacy- tai Prisma-sarjojen rannetukien kanssa.

Pukeminen

1. Pue ensin rannetuki sen ohjeiden mukaisesti.
2. Pujota peukalo lisäosan lenkin läpi. Kuva 2.
3. Kiinnitä Thumblift-osan tarranauha rannetuen kämmenselän puoleiseen nukkapintaan.



Säädä tuen kireyttä tarvittaessa. On tärkeää, että tuki istuu mukavasti ilman puristusta tai hankausta, eikä se haittaa normaalia verenkiertoa.

Materiaali

Polyesteri, viskoosi, elastaani, nailon. Lateksiton.

Pesuohe

Sulje tarranauhat ja poista mahdolliset tukiosat rannetuesta ennen pesua. Noudata pesuoheja. Käytä pesupussia. Kuivaus huoneenlämmössä.



Koko

Yksi koko. Tuki on bilateraalin eli sitä voidaan käyttää sekä oikeassa, että vasemmassa kädessä.

Kierrätys

Poista irrotettavissa olevat tukiosat ja lajittele paikallisten säädösten mukaisesti.

Laitte täyttää Lääkinnällisen laitteiden asetus 2017:745, luokka 1, vaatimukset.



Manufacturer Catell AB

Västberga Allé 26, SE-126 30 Hägersten, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

Bruksanvisning - Thumblift

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvariga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde

Ortosen stödjer och lyfter brukarens basfalanger tum, i samband med nervinklämning, efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Produkten används i kombination med Lacy- eller Prismaortoser.

Applicering

1. Applicera handledsortosen enligt dess bruksanvisning.
2. Trä därefter tummen i Thumblift. Bild 1
3. Fäst Thumblift på handledsortosens mjuka dorsala kardborre.



Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

Material

Soft: polyester, viskos, elastan, nylon. Produkten är latexfri.

Tvättråd

Slut kardborrbanden och ta ut ev. skena ur skenfickan. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



Storlek

One size. Produkten är bilateral.

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

Återvinning

Om produkten har en löstagbar skena, tag ur denna och sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se